

DEZINFEKČNÍ PROGRAM

pro ambulanci lékaře

	Přípravek	Koncentrace	Doba působení	Účinnost	Kdy	Jak
Ruce						
hygienická dezinfekce	Sterillium® pure	konc.	30 s 60 s	A(B)TM(V) A(B+)TM(V)	před a po kontaktu s pacientem; po kontaktu s kontaminovanými místy; před výkony vyžadující aseptické podmínky, po kontaktu s tělními tekutinami	hygienická dezinfekce rukou - vtírat do rukou tak, aby byly po celou dobu aplikace vlhké
	Sterillium® med	konc.	30 s	ABTMV		
	Sterillium® Gel pure	konc.	30 s 1 min	A(B+)TMV ABTMV		
mytí	Baktolin® pure	-	-	-	na začátku pracovní směny; při znečištěných rukách; po použití toalety; před jídlem	nanést na mokré ruce, napěnit, opláchnout
péče a regenerace	Baktolan® lotion (pure)	-	-	-	při pocitu vysušených rukou, několikrát za směnu	vetřít do suchých rukou
	Baktolan® balm (pure)	-	-	-		
	Baktolan® protect+ pure	-	-	-		
Kůže						
neporušená kůže					před vpichem injekce; před zavedením kanyly na místech chudých na potní žlázy	nanést rozprašovačem, rozetřít tampónem
rány, sliznice	Octenisept	dle příbalového letáku				
Nástroje						
běžné nástroje (nůžky, pinzety, skalpely,...)	Bomix® plus	0,5%	15 min	A(B)(V)	ihned po použití nástroje	rozevřený nástroj vložit do roztoku, po uplynutí expoziční doby vyjmout, opláchnout a osušit
	Chirosan plus	1,0%	10 min	A(B)TM(V)		
Plochy						
kontaktní povrchy	Bacillol® AF	konc.	1 min	A(B+)TM(V)	po kontaminaci plochy	nastříkat na celou plochu, rozetřít a udržovat vlhké po celou expoziční dobu
	Bacillol® 30 Sensitive Foam	konc.	1 min 3 min	A(B)(V) A(B)TM(V)		
	Bacillol® 30 Sensitive Tissues	utěrka	1 min 3 min	A(B)(V) A(B)TM(V)		
	Bacillol® Zero Tissues	utěrka	2 min	AB(V)		
	Mikrobac® Tissues	utěrka	30 s	A(B)(V)		
ultrazvukové sondy	Mikrobac® Virucidal Tissues	utěrka	2 min	A(B+)V	po použití UZ sondy pro transrektální, transvaginální nebo abdominální vyšetření	otřít utěrkou
			5 min	ABV		
dezinfekce s čisticím účinkem	Mikrobac® forte	0,5%	60 min	A(B)(V)	všechny prostory - denně na vlhko odběrová místa - 3x denně	dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít; neosušovat
		1%	15 min			
		1,5%	5 min			
	Mikrobac® plus	0,5%	60 min	A(B)(V)		
		1%	15 min			
		1%	60 min	A(B)T(V)		
	Desam OX	2%	15 min	A(B)(V)		
2,0%		60 min	A(B)T(V)			

A	baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
B	virucidní podle ČSN EN 14476 (Adenovirus, poliovirus, norovirus (MNV))
(B+)	omezené spektrum virucidní účinnosti (Adenovirus, norovirus (MNV)) dle ČSN EN 14476 A2
(B)	virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN 14476 A2 (<i>Vacciniavirus</i>) nebo podle DVV/RKI (<i>Vacciniavirus</i> , BVDV)
T	tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (<i>Mycobacterium terrae</i>) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
M	mykobaktericidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
V	fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>), ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
(V)	fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (<i>Candida albicans</i>), ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH