

Návrh dezinfekčního plánu včetně alternací

Oblast dezinfekce	Název produktu		Účinné proti koronaviru	Koncentrace	Doba působení	Poznámka
Nástroje	ID 212 Extrémně šetrná k nástrojům, proti korozi, neleptá pryžová madla		✓	2%	5 minut	Pro tuberkulocidní účinek 60 minut, vhodné i pro ultrazvukovou čističku
	ID 213 (alternace)		✓	2%	5 minut	Pro tuberkulocidní účinek 60 minut, v ultrazvukové čističce 30 minut
Rotační nástroje	ID 220		✓	Neředěno	1 minuta	Plně virucidní
Plocha - zubní souprava	FD 366 sensitive top wipes		✓	Připravený ubrousek	1 minuta	Šetrná dezinfekce koženky, plastů, skla apod. mezi pacienty. Zabraňuje popraskání koženky. Dostupné v kyblíku s náhradním balením (100 ks) nebo po 50 ks.
	FD 312 wipes		✓	Připravený ubrousek	15 minut	Plně virucidní, na závěr dne dezinfikuje a umývá křeslo v jednom kroku
	FD 360 čištění a impregnace koženky			Neředěno		Jednou týdně pro impregnaci, při znečištění aplikace co nejdříve, pomocí houbičky se aplikuje a poté utře papírovým ubrouskem
Malé plochy - nástroje	FD 350 wipes		✓	Připravený ubrousek	1 minuta	Ubrousky
	FD 322		✓	Neředěno	1 minuta	Postřik
	FD 333 forte		✓	Neředěno	1 minuta	Postřik, plně virucidní
Velké plochy a podlahy	FD 300		✓	1%	15 minut	Plně virucidní, při 2%ní koncentraci kratší doba působení 5 minut
	Alternace: FD 312		✓	1%	15 minut	

Oblast dezinfekce	Název produktu		Účinné proti koronaviru	Koncentrace	Doba působení	Poznámka
Ruce	HD 410 dezinfekce rukou (šetrná, zpětně promašťuje pokožku)		✓	Neředěno	15 vteřin	Pro tuberkulocidní bakterie 30 vteřin, pro chirurgickou dezinfekci 120 vteřin
	HD 435 mycí emulze		✓	Neředěno		pH blízké pokožce, nevysušuje
	HD 440 pečující krém			Neředěno		Během pauzy či na konci dne
Odsávání	Orotol Plus		✓	2%	Minimálně 60 minut, ideálně přes noc	Aplikujte pomocí Orocup pro maximální efekt
	MD 555 čistič odsávání			5%	30-120 minut, poté proplach	Aplikujte pomocí Orocup pro maximální efekt, odstup od aplikace Orotolu nejméně 2,5 hodiny
	MD 550 dezinfekce a čistič plivátka		✓	Neředěno	5 minut	Efektivně odstraňuje detektor plaku z plivátka
Dezinfekce odsávacích hadic	FD 350 wipes		✓	Připravený ubrousek	1 minuta	
	FD 322		✓	Neředěno	1 minuta	
Dezinfekce otisků a obrobků	MD 520		✓	Neředěno	5 minut	Plně virucidní, nedeformuje otisk. Doporučujeme použít s dózou na dva otisky od Dürr Dental
Čištění předmětů od cementu, zubního kamene, oxidačních vrstev, zbytků tavidla...	MD 530			Neředěno	Maximálně 10 minut	
Odstranění sádry nebo alginátů	MD 535			Neředěno		