

NÁVOD K POUŽITÍ

4160100 – Automatický dávkovač na gelovou dezinfekci 1100 ml, ABS plast, bílý


Bezdotykový dávkovač gelové dezinfekce s infračerveným senzorem a baterií. Senzor zamezuje přímému kontaktu dávkovače s rukou, a tak efektivně zabraňuje křížové infekci. Nízký výkon umožňuje dlouhou životnost baterie. Je ideální volbou pro zdravotnictví, hotely, restaurace, domácnost a jiná zařízení.

Funkce

- Díky inteligentnímu dávkování se lze vyhnout nepřetržitému dávkování vyvolaného umělým podmětem. Dávkovač přestane pracovat po 30ti sekundách nepřetržitého dávkování.
- Dávkovač dává 1 dávku každé 3 sekundy. Po 10ti dávkách v řadě přestává dávkovat. Opětovné dávkování musí být vyvoláno novým podnětem spínacímu infračervenému senzoru .


Komponenty

1. Otvor pro instalaci
2. Přepínač (on/off)
3. Pumpa
4. Senzor
5. Vývod
6. Plnicí láhev
7. Uzávěr láhve
8. Kryt baterií

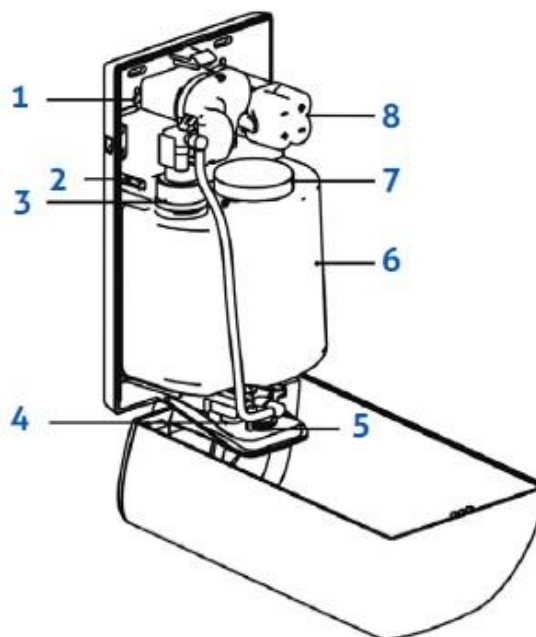

Instalace baterií

- Sejměte kryt pol.3 a v ložte 4 kusy LR6 baterií pol.1 podle pólu „+“ a „-“, nasadte zpět kryt baterií a „uzavřete“.

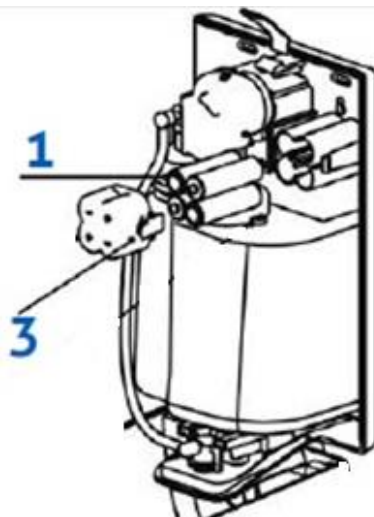

Doplnění dezinfekce

- Odemkněte dávkovač a otevřete uzávěr plnicí nádrčky , doplňte gelovou dezinfekci a uzavřete otvor plnicí nádrčky. Maximální objem naplnění je 1100 ml.

Použití

- Otevřete přední kryt, zapněte přepínač na ,zapnuto'. Zavřete kryt a dávkovač je připraven k použití.
- Při prvním použití je třeba použít víckrát, pro vyčerpání vzduchu z dávkovací pumpy.
- Při používání dávkovače umístěte ruku 0 – 8 cm pod vývod dávkovače a ten začne ihned automaticky dávkovat. Při každé dávce vydá 1 ml. Pokud ruku neodstraníte zpod senzoru, bude dávkovat 1 dávku každé 3 sekundy a po 10-ti dávkách přestane pracovat.

Specifikace

Napětí: DC 4 x 1,5V LR6

Kapacita: 1100 ml

Spínací vzdálenost senzoru : přibližně 8 cm

Objem jedné dávky: 1 ml

Poznámky

- Chcete-li se vyhnout nesprávnému používání, ponechte alespoň 40 cm prázdného prostoru pod dávkovačem
- Neinstalujte dávkovač na místa se silným přímým slunečním zářením.
- Zabraňte jakémukoliv ucpávání a blokování výstupu tekutiny dávkovače
- Udržujte dávkovač na desinfekci čistý.
- Neoplachujte dávkovač přímo.
- Nepoužívejte pro čištění dávkovače žádné ředidlo či jinou, podobně silnou, chemickou kapalinu, která by jej mohla poškodit.
- Pokud dávkovač při plnění kapaliny při prvním užití nebo po doplnění nepracuje, zmáčkněte několikrát pumpičku, aby se vyprázdnil vzduch v obvodu čerpadla.

Instalace

