

Kompatibilní
s virovými
transportními
médii (VTM)

Test NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B (virová chřipka)

Pro kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2, jakož i viru influenza typu A a B v lidských nazofaryngeálních vzorcích

COVID-19 nebo chřipka?

Infekce dýchacích cest COVID-19 – vyvolaná novým koronavirem SARS-CoV-2 – často způsobuje příznaky podobné těm z klasické chřipky. Protože je COVID-19 vykazované onemocnění, je nezbytné, aby byla co nejrychleji stanovena konkrétní diagnóza u pacienta se závažnými příznaky, jako jsou horečka, suchý kašel, bolest v krku, bolesti hlavy, bolesti kloubů a únava.

Test NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B (virová chřipka) je navržen tak, aby vám pomohl rychle a snadno určit, zda může být přítomna infekce COVID-19 nebo chřipka.

Včasná diagnóza umožňuje rychlé zavedení opatření na ochranu pacientů a jejich kontaktů, jakož i dodržování povinnosti hlásit onemocnění COVID.

Test NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B (virová chřipka)

Test NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B (virová chřipka) je imunochromatografický test s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2, jakož i viru influenza typu A a B v lidských nazofaryngeálních vzorcích. Test NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B (virová chřipka) obsahuje dva vnitřní testovací proužky.

www.nal-vonminden.com


Test slouží jako pomůcka ke stanovení diagnózy infekce virem SARS-CoV-2, jakož i virem influenza typu A a B. Mějte na vědomí, že se koncentrace virových nukleoproteinových antigenů může v průběhu onemocnění lišit a může klesnout pod hranici detekce testu. Možnou nakažlivost testovaných osob nelze vyloučit na základě negativního výsledku testu.

Stručný přehled Vašich výhod

- ✓ Testovací kazeta 2 v 1 pro současné testování obou parametrů
- ✓ Pro oba parametry lze použít stejný vzorek
- ✓ Výsledky během pouhých 15 minut
- ✓ Extrakční pufr inaktivuje koronavirus kvůli bezpečnosti při provádění testu
- ✓ Všechny komponenty testu jsou součástí sady
- ✓ Sada může být skladována při pokojové teplotě
- ✓ Není nutná laboratorní digestoř



Provedení testu

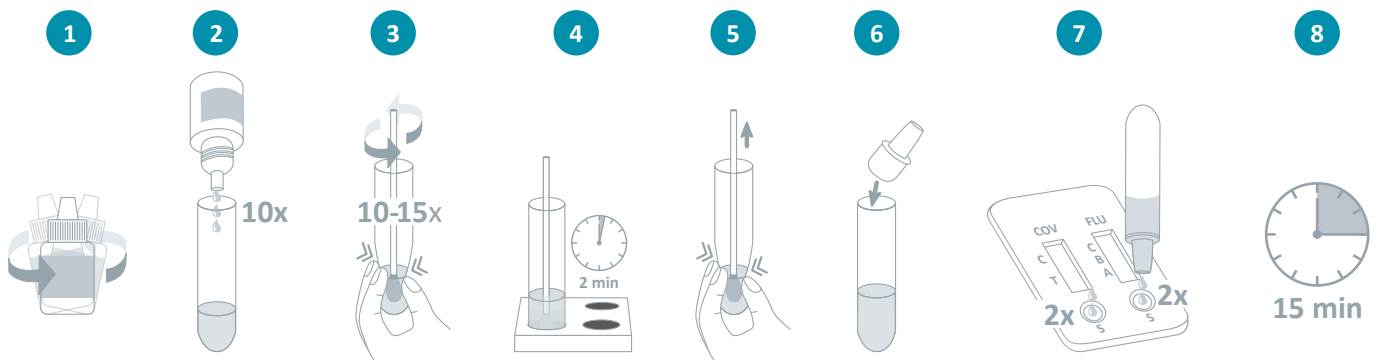

1. Opatrně promíchejte pufr otáčením lahvičky.
2. Držte lahvičku s pufrům svisle, přidejte 10 kapek do extrakční zkumavky, aniž byste se dotkli okraje zkumavky.
3. Vložte tampón s odebraným vzorkem do zkumavky. Otáčejte tampónem, vymáčknete jej 10-15krát tak, že stlačíte stěny extrakční zkumavky proti tampónu, aby se extrahovaly antigeny obsažené v tampónu.

4. Nechte roztok stát po dobu 2 minut.
5. Vyjměte tampón a tlačte ho proti stěně zkumavky tak, abyste z něj vytlačili co nejvíce tekutiny.
6. Nasadte na extrakční zkumavku špičku a otočte ji vzhůru nohama.

7. Přidejte 2 kapky extrahovaného roztoku do každého otvoru pro vzorek (S) na testovací kazetě.
8. Vyčkejte, až se objeví barevná/barevné linie. Výsledek testu odečtěte přesně po 15 minutách.

Podrobnější informace naleznete v návodu k použití.

Vyhodnocení výsledků



Test NADAL® COVID-19 Ag+Influenza A/B (virová chřipka)

Pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2, jakož i viru influenza typu A a B

Produkt	Vzorek	Senzitivita	Specifita	Obj. č.	Velikost balení
Testovací kazeta NADAL® COVID-19 Ag + Influenza A/B (virová chřipka)	Nazofaryngeální výtěry	Influenza A: 83,3 % Influenza B: 82,4 % COVID-19 Ag (Ct 20-30): 97,6 %	Influenza A: 92 % Influenza B: 94,3 % COVID-19 Ag: >99,9 %	243203N-20	20 testů v balení

Sada obsahuje testovací kazety • tampóny • extrakční zkumavky vč. špiček • pufr • držák na činidla • návod k použití

Rev01.01/XX0705en00079
Rev01.01/CZ05c00016

Další informace:



We help you care!

Rychlé testy

Laboratorní diagnostika

Laboratorní služby

Poradenství a služby