


Návod k použití
Euroseal[®] Infinity

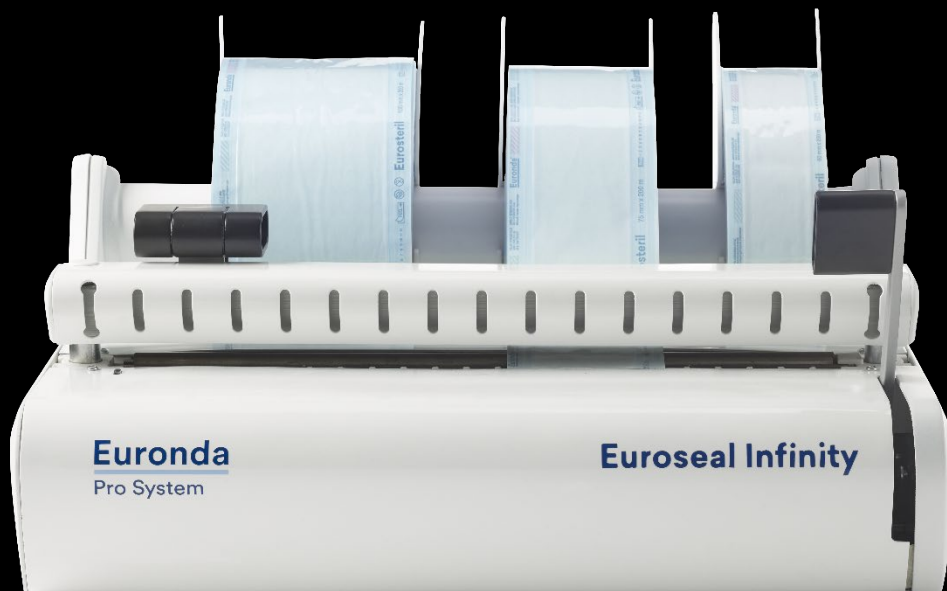

CE

Euronda[®]

Vážený pane nebo paní,

nejprve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení svářečky přístroje **Euroseal® Infinity**.

Pokud požadujete další informace nebo máte jakékoli dotazy týkající se provozu a používání tohoto zařízení, neváhejte nás kontaktovat.

Vezměte prosím na vědomí, že pro zajištění správného používání přístroje si musíte před uvedením přístroje do provozu pečlivě přečíst tento návod. Naše zařízení je navrženo v souladu s platnými bezpečnostními normami a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko za předpokladu, že budou dodrženy všechny pokyny. Vezměte prosím také na vědomí, že společnost Euronda S.p.A. odmítá veškerou odpovědnost za nesprávné nebo nedostatečné interpretace překladů této příručky: v případě sporu se použije pouze příručka napsaná v italském jazyce.

I když vám přejeme úspěch ve vaší práci, připomínáme vám, že reprodukce této příručky je zakázána a že technické komponenty mohou být změněny bez předchozího upozornění kvůli našemu probíhajícímu technickému výzkumu.

EURONDA S.p.A.

Obsah

ÚVOD	33
OBEČNÉ POZNÁMKY K DODÁVCE.....	33
OBEČNÉ POKYNY	33
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ.....	44
ZÁRUKA.....	66
KAPITOLA 1	77
1.1 - ROZMĚRY PŘÍSTROJE A BALENÍ.....	77
1.2 POPIS OBSAHU	88
KAPITOLA 2	99
2.1 - INSTALACE	99
2.2 - NÁVOD K MONTÁŽI NA ZEĎ (VOLITELNÁ SADA)	99
KAPITOLA 3	1111
3.1 - BEZPEČNOST	1111
3.2 - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.....	1212
KAPITOLA 4	1313
4.1 - POPIS PŘÍSTROJE	1313
KAPITOLA 5	1515
5.1 - NÁVOD K POUŽITÍ.....	1515
5.2 - VODÍTKO DRŽÁKU17 ROLE	17
KAPITOLA 6	1818
6.1 - POKYNY K ČIŠTĚNÍ.....	1818
6.2 - MIMORÁDNÁ ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1818
KAPITOLA 7	1919
7.1 - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	1919
KAPITOLA 8	2020
8.1 - NÁVOD K LIKVIDACI.....	2020

Úvod

OBECNÉ POZNÁMKY K DODÁNÍ

Při dodání přístroje zkontrolujte stav obalu (uchováte obal pro budoucí použití).

Otevřete obal a zkontrolujte, zda:

- dodávaný přístroj odpovídá technickým specifikacím;
- nejsou tu žádné zjevné známky poškození.

V případě poškození nebo chybějících dílů neprodleně informujte buď přepravce, prodejce nebo Euronda S.p.A.

Všechny rozměry uvedené v této příručce nejsou závazné.

Nákresy a další zasílané dokumenty týkající se tohoto stroje jsou majetkem společnosti Euronda S.p.A., která si vyhrazuje veškerá práva. Nemohou být zpřístupněny třetím stranám.

Je zakázáno reprodukovat celý text nebo ilustrace nebo jejich část.

OBECNÉ POKYNY

Účelem této příručky je poskytnout pokyny k:

- správná instalaci;
- bezpečné a účinné používání přístroje;
- běžná údržba.

Přístroj musí být používán v souladu s postupy obsaženými v příručce a pouze k účelu, pro který byl určen.

Pozor

- Zamýšlená ochrana by mohla být ohrožena, pokud je přístroj používán jinými způsoby, než které specifikuje výrobce.
- Používejte pouze originální napájecí kabel dodávaný s přístrojem.
- Podle článku 33 nařízení 1907/2006 (REACH) tímto potvrzujeme, že topné těleso přístroje obsahuje kyselinu boritou CAS č. 10043-35-3. Tato látka však nemůže vstoupit do kontaktu s uživatelem nebo sterilizovanými nástroji, protože je utěsněna uvnitř topného tělesa. Proto neexistují žádná související rizika nebo zvláštní bezpečnostní opatření, která by bylo třeba zavést při běžném používání.

Provozovatelem je osoba, která přístroj fyzicky používá k účelu, pro který byl určen.

Odpovědným orgánem je osoba nebo skupina odpovědná za používání a běžnou údržbu přístroje a za školení obsluhy. Odpovědný orgán je právně odpovědný za instalaci, provoz a používání přístroje.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli problémy s provozem nebo poškození způsobené přístrojem, pokud je nesprávně používán nebo není řádně udržován..

Účel použití: Tato příručka je nedílnou součástí výrobku a musí být uchovávána v blízkosti přístroje pro rychlou a snadnou konzultaci. Přístroj je určen pouze k použití pouze odbornými a kvalifikovanými osobami. Přístroj smí být používán pouze k určenému účelu.

EUROSEAL® Infinity: přístroj se používá k utěsnění rolí a sáčků vyrobených z laminovaného papíru/polyethylenu pro balení sterilizovaných nástrojů používaných v lékařském, veterinárním, podologickém a tetovacím sektoru.

Nevhodné pro role jiných materiálů.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Bezpečnostní symboly na zařízení:


Symbol	Popis
	POZOR: HORKÝ POVRCH

Štítek přístroje nese symboly, jejich význam je uveden níže.

TYPOVÝ ŠTÍTEK



Typový štítek ukazuje hlavní údaje a vlastnosti přístroje.

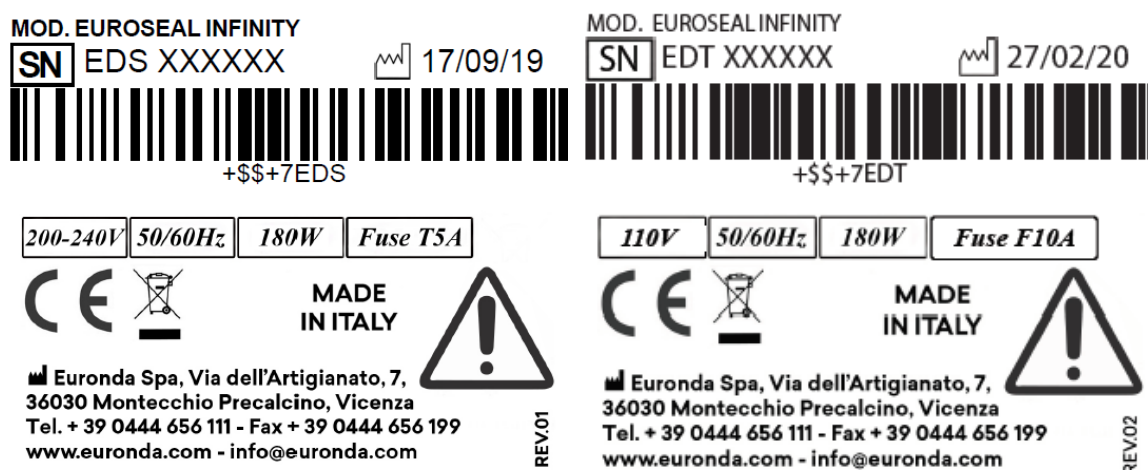Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci přístroje při objednávání náhradních dílů a/nebo při vyžádání dalších informací. Informace uvedené na následujícím obrázku se mohou změnit.



Symbol	Popis
SN	"SÉRIOVÉ ČÍSLO" Za symbolem musí následovat sériové číslo výrobce. Sériové číslo musí sousedit se symbolem.
	"DATUM VÝROBY" Symbol musí být doprovázen rokem. Rok se musí skládat ze čtyř číslic.
	"UPOZORNĚNÍ, PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ"
	Symbol na přístroji znamená, že musí být zlikvidován jako "tříděný odpad".

V příručce jsou navíc symboly sousedící s popisem nebo poznámkou atd. Tyto symboly jsou určeny k tomu, aby čtenáře upozornily na konkrétní poznámku nebo vysvětlení. Jejich významy jsou vysvětleny níže.

Symbol	Popis
	<p>DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Tento symbol slouží k upozornění čtenáře na obzvláště důležité pojmy pro bezpečnost obsluhy.</p>
	<p>INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Tento symbol odkazuje na obecné indikace a rady.</p>

Záruka

Euronda zaručuje kvalitu svého vybavení, pokud je používáno v souladu s pokyny uvedenými v této příručce a v souladu s podmínkami vytištěnými na záručním listu.


Záruka začíná, když je přístroj registrována na webových www.euronda.com/myeuronda webových stránkách. Tato registrace musí probíhat v okamžiku prodeje téhož prodejci koncovému uživateli.

V případě, že není registrace, použije se datum uvedené na nákupní faktuře s seriovým číslem přístroje.


POZNÁMKA: Originální obal si prosím uchovejte a používejte jej pokaždé, když je třeba přístroj přepravovat. Použití různých obalů by mohlo poškodit výrobek během přepravy.

KAPITOLA 1

1.1 - ROZMĚRY PŘÍSTROJE A BALENÍ

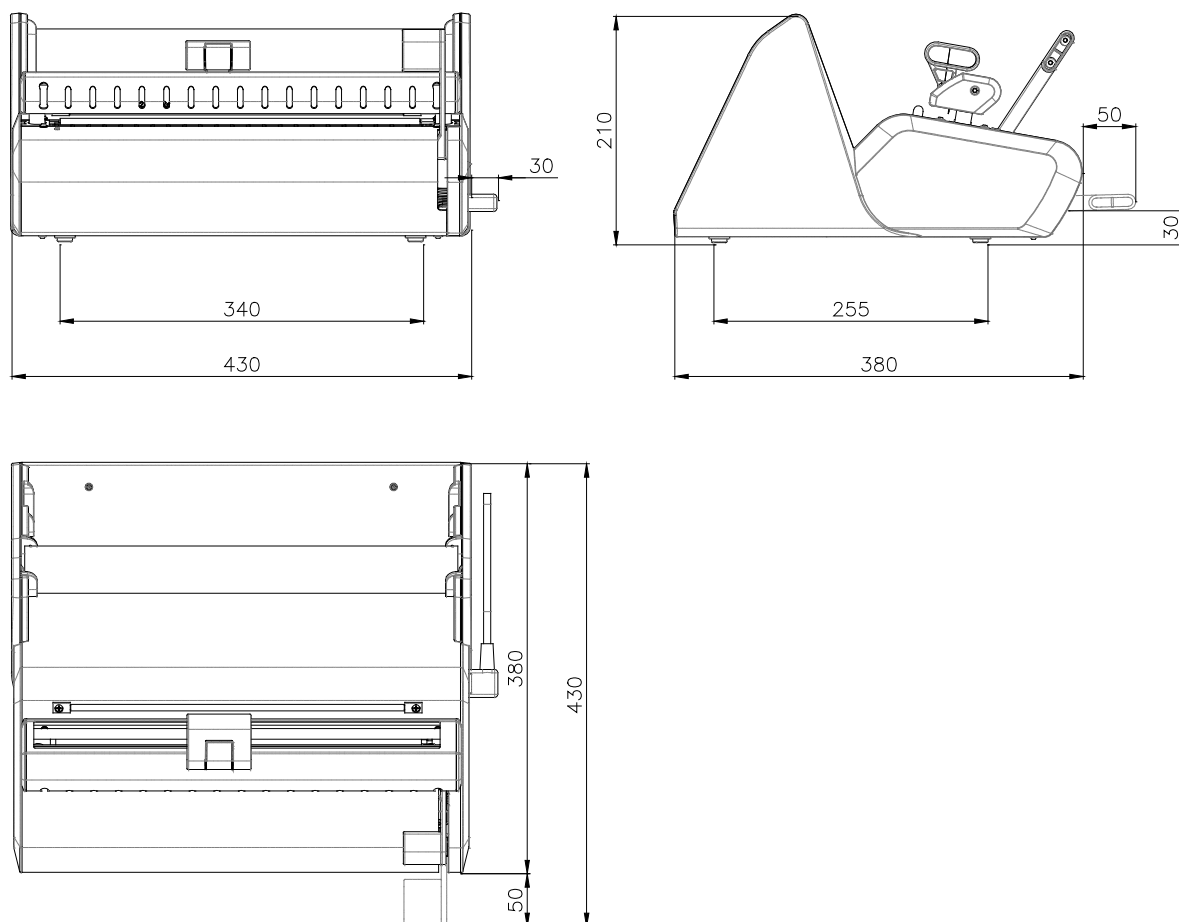

Rozměry přístroje EUROSEAL® Infinity

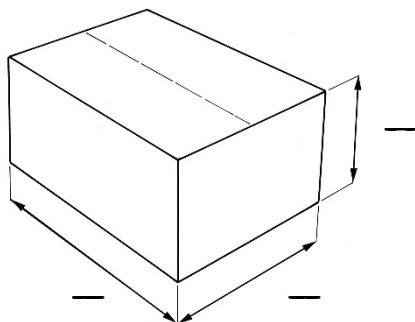

Celkové rozměry obalu:

A = 510 mm
 B = 470 mm
 C = 240 mm

Celková hmotnost obalu: 8 kg

1.2 POPIS OBSAHU

Popis	Množství
Přístroj pro svařování sterilizačních folií	1
Držák rolí	1
Zarážky rolí	2
Síťový kabel	1
Náhradní pojistka T5A 5x20 nebo F10A 5x20	1
Návod k použití a dokumenty	1
Silica gel	2

KAPITOLA 2

2.1 - INSTALACE



Odstraňte obal a nainstalujte přístroj s následujícími bezpečnostními opatřeními:

1. Umístěte svařovací přístroj na rovný povrch s dostatečným pracovním prostorem kolem ní.
2. Neinstalujte přístroj vedle dřezů nebo něčeho podobného, aby nedošlo ke kontaktu s vodou a zkratu elektrického systému.
3. Vyhněte se blízkosti zdrojů tepla.
4. Přístroj instalujte do prostoru s normálním větráním.
5. Ujistěte se, že přívodní kabel není ohnutý nebo zlomený až do elektrické zásuvky.
6. Přístroj musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.
7. Zapojte zásuvku; přístroj je připraven k použití.

2.2 - NÁVOD K MONTÁŽI NA ZEĎ (VOLITELNÁ SADA)

Montáž přístroje na stěnu vyžaduje zakoupení příslušné volitelné sady a následujících pokynů uvedených níže.

- 1) Zašroubujeme dva 6 mm šrouby do hmoždinek umístěných na stěně (hlava šroubu max. průměr 9,5 mm; dřík šroubu max. 5 mm) ve vzdálenosti 212 mm od sebe. Ujistěte se, že šrouby vyčnívají ze stěny o 14 mm, aby bylo možné uchytit těsnicí a řezací stanici.

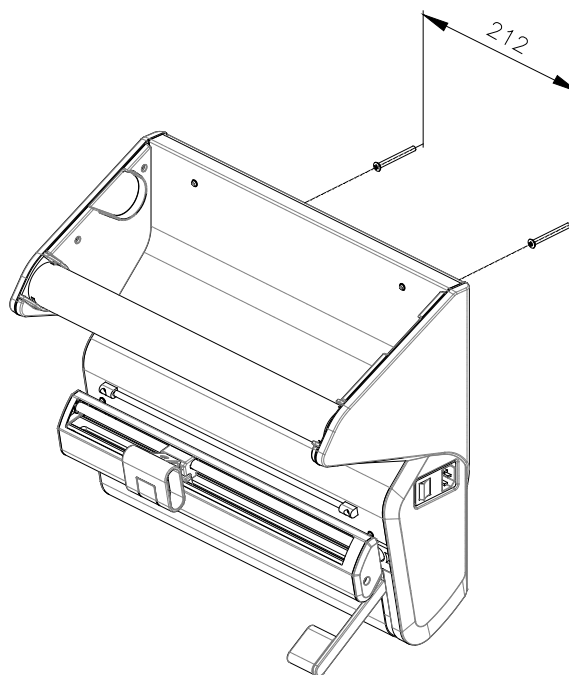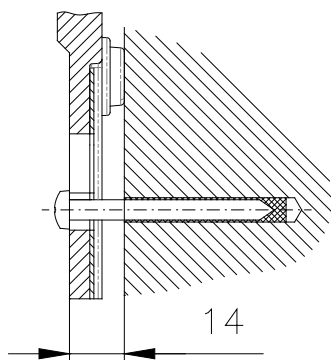


POZOR:

Používejte hmoždinky, které jsou vhodné pro daný typ stěny (cement, cihla, sádkartón atd.).

- 2) Připevněte obě desky ke stroji pomocí šroubů dodávaných se sadou.
- 3) Příklad připevnění ke dvěma šroubům na stěně.

Umístěte otvory přístroje na **hlavy šroubů (1)** a zatlačte **dolů (2)**, abyste je zajistili na místě.

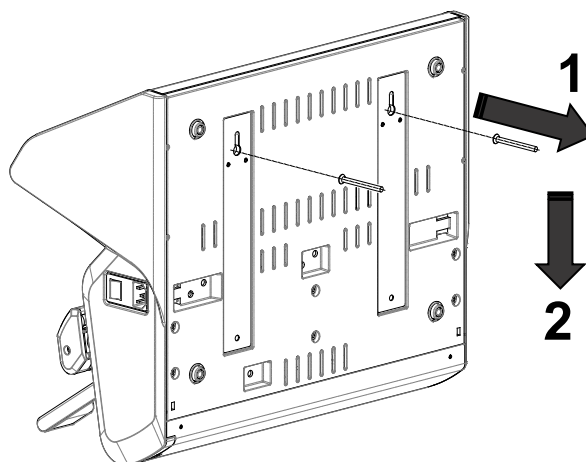

- 4) Vložte držák s rolemi.



POZOR:

Vložte trubku na držák role svařovacího přístroje a podle potřeby otáčejte, abyste se ujistili, že zub držáku role zachytí otvor na trubce.

KAPITOLA 3

3.1 - BEZPEČNOST



Před použitím EUROSEAL® Infinity si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace. Nedodržení těchto informací může způsobit nehody nebo poškození stroje.

- Před použitím přístroje musí obsluha dokonale pochopit význam a funkce všech ovládacích prvků.
- Provozovatelé musí vědět, jak uplatňovat bezpečnostní předpisy upravující používání přístroje.
- Provozovatelé musí znát a správně interpretovat všechny údaje obsažené v této příručce a údaje použité na přístroj.
- Provozovatelé nesmí provádět operace z vlastního podnětu nebo operace, které nejsou součástí jejich práce.
- Odpovědný orgán musí provozovatele poučit a vyškolit, aby přístroj bezpečně používal a obsluhoval; zejména musí zajistit, aby informace obsažené v tomto dokumentu byly správně pochopeny.



NIKDY NEUMISŤUJTE PRSTY DO BLÍZKOSTI TĚSNICÍ OBLASTI, KDYŽ JE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ.

PŘI SNÍMÁNÍ TĚSNICÍ RUKOJETI NIKDY NEUMISŤUJTE PRSTY POD KRYT TĚSNICÍ OBLASTI.

NIKDY NEUMISŤÍTE PRSTY DO OBLASTI POSUVNÉ ŘEZNÉ ČEPELE.

PŘÍSTROJ UDRŽUJTE NA ČISTÉM A SUCHÉM MÍSTĚ.

NIKDY NEROZEBÍREJTE PŘÍSTROJ EUROSEAL® INFINITY. VYSOKÉ NAPĚTÍ UVNITŘ PŘÍSTROJE JE NEBEZPEČNÉ.

V případě, že elektrickou energii nelze odpojit, jistič dejte do polohy "VYPNUTO", a pokud je mimo dohled nebo dosah obsluhy údržby, umístěte na něj ceduli "Probíhá práce".



STROJ VYČISTĚTE VLHKÝM HADŘÍKEM POTÉ, CO JSTE SE UJISTILI, ŽE PŘIPOJOVACÍ KABEL BYL ODPOJEN (před opětovném užitím se ujistěte, že je zcela suchý). NA ETIKETU NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA.

UJISTĚTE SE, ŽE SYSTÉM JE UZEMNĚN PODLE SOUČASNÝCH ZÁKONŮ V ZEMI INSTALACE.

NEODSTRAŇUJTE ŠTÍTEK NA PŘÍSTROJI.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘÍSTROJ PŘIPOJEN KE SPRÁVNÉMU ELEKTRICKÉMU NAPĚTÍ.

POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.

V případě poruchy provozu stroje naleznete možné příčiny v části "řešení problémů" v příručce. Pokud potřebujete další informace nebo je třeba přístroj opravit, obraťte se na specializované pracovníky dodavatele nebo technického oddělení společnosti Euronda S.p.A.

Upozornění

- Stroj odpovídá bezpečnostním předpisům stanoveným Standardním institutem a má dvoukolíkovou zástrčku, která zajišťuje, že je zařízení odolné proti nárazům.
- K zemi je připojena pouze topná spirála, protože zbytek stroje má dvojitou izolaci.
- Základním bezpečnostním požadavkem je zkontrolovat kvalifikovaným personálem, zda je elektrický systém dostatečně uzemněn a zda je kapacita systému a zásuvek vhodná pro výkon přístroje uvedené na identifikačním štítku.

EURONDA S.P.A. ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST, POKUD NENÍ DODRŽENO VÝŠE UVEDENÉ.

3.2 - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na štítku na boku stroje odpovídá napětí místa instalace.

Přístroj musí být připojen k elektrickému systému s dostatečným napětím, které odpovídá všem normám země instalace.

Přístroj lze napájet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

**POZOR:**

Nelámejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte předměty jakéhokoli druhu.

KAPITOLA 4

4.1 - POPIS PŘÍSTROJE

Euroseal® Infinity je nejnovější svařovací a řezací přístroj od Eurondy s nepřetržitým cyklem a konstantní teplotou se zaručeným těsnícím svárem 12 mm. Euroseal® Infinity je stroj s moderním, inovativním a ergonomickým designem, snadno použitelný a snadno se čistí, se zaoblenými konturami a opatřený držákem role o celkové velikosti obsaženým v minimální délce stroje. Uvnitř přístroje lze instalovat na držák rolí 100 nebo 200 metrů sterilizační role papír / polypropylen. Nová aplikovaná technologie minimalizuje spotřebu energie díky kratším dobám svařování a eliminaci potřeby doby chlazení mezi jednotlivými použitími. Rovněž významně zvyšuje spolehlivost přístroje a zjednodušuje údržbu řezacího nože. EUROSEAL® infinity je postaven v souladu s předpisy EU a standardy kvality.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájecí napětí	200 - 240 V	100 - 120 V
Počet fází	1	
Frekvence	50 / 60 Hz	
Příkon	180 W	
Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem	I	
Třída izolace	IPX0*	
Pojistky	2 – 5x20mm T5A	2 – 5x20mm F10A
Rozsah podmínek prostředí, ve kterých byla přístroj navržen pro provoz	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní použití - Nadmožská výška do 2000 m - Teplota: mezi 5°C a 40°C - Max. relativní vlhkost 85% - Maximální odchylka napětí: ± 10 % - Kategorie přepětí: II - Stupeň znečištění: 2 - Dočasné krátkodobé přepětí 240 V + 1200 V až 5 s - Dočasné dlouhodobé přepětí 240 V + 250 V po dobu více než 5 s 	
Vypínač	Jedno pólový	
Hmotnost stroje	7 kg.	
Těsnící pás	12 mm	
Typ těsnění	Při konstantní teplotě mezi 170 °C a 200 °C.	
Šířka těsnící plochy	310 mm.	
Topení	Jednoduché, s automatickým samočinným nastavením, vhodné pro všechna napětí, bez zkratu a postavené podle bezpečnostních standardů.	
Držák role	Dvě polohy použití.	
Spotřeba energie	O 30 % až 50 % méně než standardní impulsní těsnící stroje	
Doba chlazení	Žádná prodleva mezi těsnící operací a kdy je přístroj zapnutý	
Umístění pásky během těsnící fáze	Lhostejný (film nad nebo pod)	
Čepel	Praktická, chráněná, funkční a snadno použitelná	
Těsnící rukojeť	Ergonomická rukojeť vyžadující nižší námahu	
Design	Ergonomická a zaoblená	
Barevné	RAL 9016, epoxidový prášek lakovaný	
Pravidelná údržba	Není vyžadováno	

* První charakteristická číslice označuje, že kryt zajišťuje ochranu osob před nebezpečnými součástmi a brání nebo omezuje přístup osob do objektů v manipulaci s předměty; a zároveň kryt chrání zařízení před pronikáním cizích pevných těles. X - není deklarováno.

Druhá číslice označuje třídu ochrany krytu proti poškození zařízení v důsledku pronikání vody do krytu. 0 - žádná ochrana.


KAPITOLA 5

5.1 - NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k elektrickému napájení.


Stiskněte vypínač - **A** - na boku přístroje.

LED dioda - **B** - v přední části přístroje bude svítit červeně po dobu zahřívání, a poté, co bude dosažena optimální teplota svařování, začne LED dioda blikat zeleně.

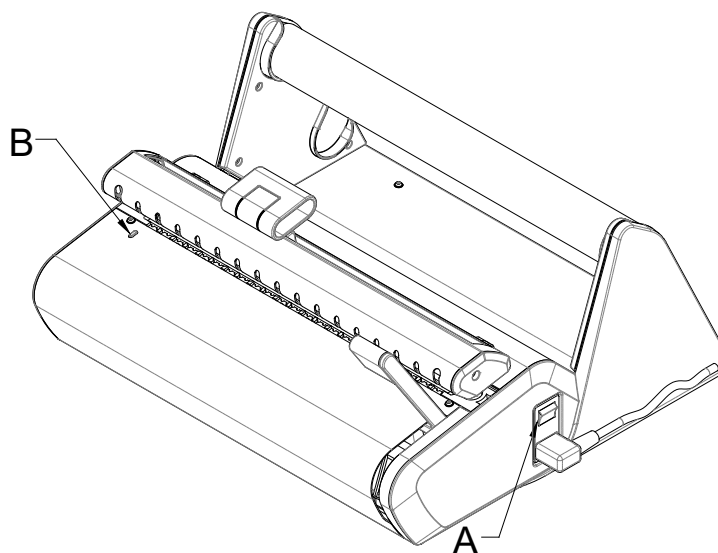**2. Vložte sterilizační folii - C - pod držák role - D -.**

Pás sterilizační folie posuňte dopředu, dokud nevyčnívá požadovaná délka.

Role může být umístěna buď čirým filmem nahoru nebo dolů.

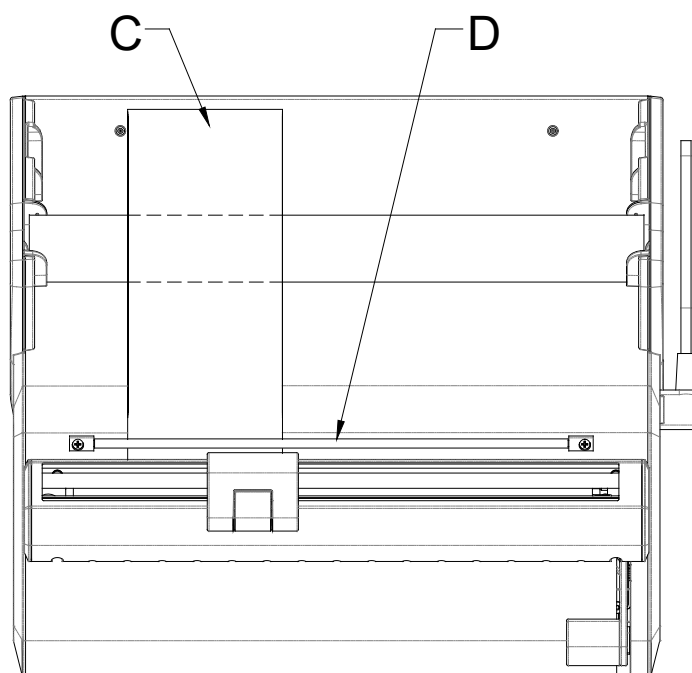


3. Stiskněte těsnicí rukojeť.

Posuňte kurzor řezného kotouče na druhou stranu a přestříhnete sterilizační folii (když je rukojeť dole).

Na konci svařování se LED dioda zcela zčervená a stroj vydává zvuk.


V tomto okamžiku je svařování dokončeno.

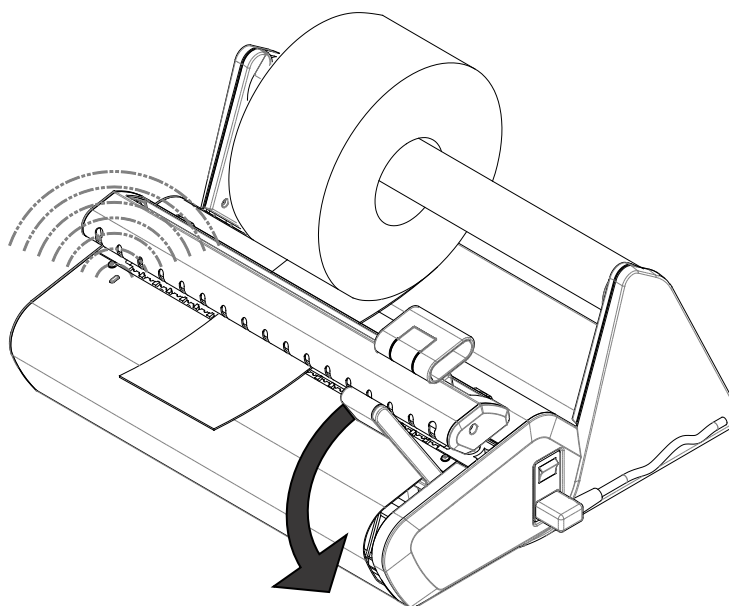**4. Zvedněte těsnicí rukojeť.**

Když je rukojeť v horní poloze, led dioda se znovu zezelená a zvuk se zastaví.

Vytáhněte svařenou sterilizační folii.

Přístroj je připraven k dalšímu sváru sterilizační folie bez nutnosti čekat, až vychladne.

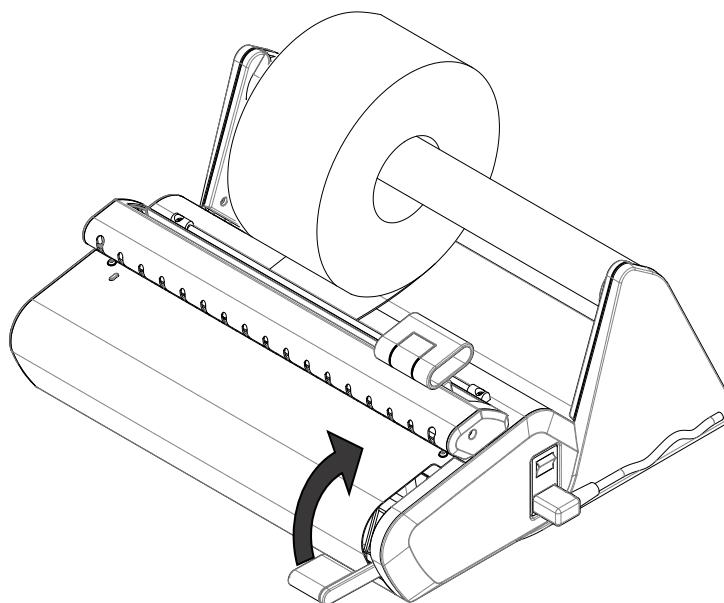**POZOR:**

Pokud obsluha po dokončení sváru nezvedne těsnicí rukojeť, svařovací lišta se automaticky vypne, aby nedošlo ke spálení folie.

V tomto případě bliká LED dioda a stroj vytváří přerušovaný zvuk.



Jakmile je rukojeť zvednuta, svařovací lišta se automaticky znovu zapne.

Dosažení ideální teploty trvá několik sekund a můžete pokračovat ve svařování.


5.2 - VODÍTKO DRŽÁKU ROLE

Použití vodítka držáku role


Dodávaná vodítka držáku rolí zabraňují nepravidelnému vypadnutí papíru ze stran během jeho odvíjení z role.

Postupujte následovně:

- 1) vložte vodítka držáku role na trubku držáku role mírným tlakem, abyste je zacvakli na místo.

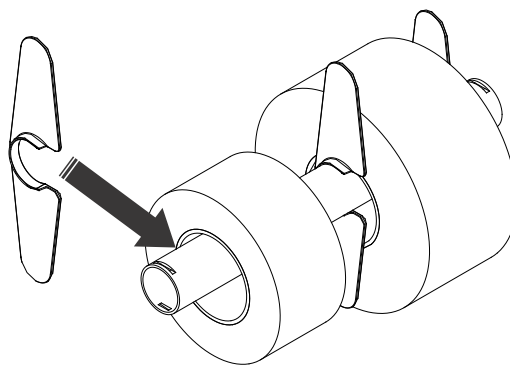

- 2) Zatlačte vodítka držáku role co nejdříve k sobě, dokud neudrží sterilizační folii na svém místě.

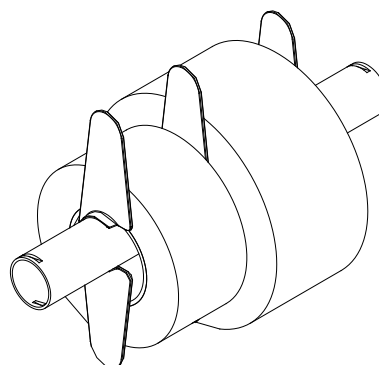

KAPITOLA 6

6.1 - POKYNY K ČIŠTĚNÍ



POZOR:
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE ODPOJTE NAPÁJECÍ ZDROJ.
Nedodržení může způsobit vážné zranění osob nebo vážně poškodit přístroj.



UPOZORNĚNÍ:
Před prováděním jakékoli údržby si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, zejména kap. 3 „Bezpečnost“



UPOZORNĚNÍ:
Při výměně součástí, které přímo nebo nepřímo ovlivňují **bezpečnost**, je nutné používat pouze **ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY**.



NEBEZPEČÍ:
VYSOKÉ VNITŘNÍ NAPĚTÍ.



POZOR:
Před čištěním se ujistěte, že stroj vychladl.
Při čištění stroje vezměte v úvahu polohu řezného nože.

VŠECHNY OPERACE PRO ÚDRŽBU MOHOU VYKONÁVAT POUZE ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO TECHNICI AUTORIZOVANÍ ASISTENČNÍ SLUŽBOU EURONDA S.p.A..

Očistěte vnější povrchy stroje měkkým vlhkým hadříkem (nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky), ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky.



POZOR:
Před zahájením práce se ujistěte, že je přístroj zcela suchý.

6.2 - MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Stroj nevyžaduje běžnou údržbu.

VEŠKERÉ MIMOŘÁDNÉ ÚDRŽBOVÉ OPERACE SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODPOVĚDNÝ ORGÁN NEBO TECHNICI POVĚŘENÍ ASISTENČNÍ SLUŽBOU EURONDA S.P.A.

KAPITOLA 7

7.1 - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problémy	Způsobit	Řešení
Blikající červená LED a Přerušovaný zvuk	Rukojeť je ve spodní poloze	Zvedněte těsnicí rukojeť
Led dioda desky se nerozsvítí několik minut po zapnutí přístroje	Rozbitá elektronická deska Světlo nefunguje. Topení se nezahřívá Žádné napětí Spálené pojistky	Výměna elektronické desky Výměna LED Výměna topného tělesa Počkejte a/nebo proveďte reset Zkontrolujte možné zkratky nebo poruchy a nahradte je pojistkami stejné hodnoty
Proces utěsnění probíhá normálně, ale LED zůstává zelená	Mikrospínač rozbitý	Výměna mikrospínače
Těsnicí lišta se ohřívá, ale svár je nepřijatelný	Nedostatečný těsnicí tlak Silikonová guma je zničena	Zkontrolujte šrouby zajišťující podporu silikonové gumy Výměna silikonové gumy

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE ODPOJTE NAPÁJECÍ ZDROJ.

VEŠKERÉ MIMOŘÁDNÉ ÚDRŽBOVÉ OPERACE SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODPOVĚDNÝ ORGÁN NEBO TECHNICI POVĚŘENÍ ASISTENČNÍ SLUŽBOU EURONDA S.P.A.

NEBEZPEČÍ: VYSOKÉ VNITŘNÍ NAPĚTÍ

KAPITOLA 8


8.1 - NÁVOD K LIKVIDACI

Přístroj EUROSEAL® Infinity byl vyroben z železných materiálů, elektronických součástek a plastových materiálů.

Pro likvidaci nejsou vyžadovány žádné zvláštní operace. Nevyhazujte přístroj na nestřežené místo; odevzdejte jej agentuře pro likvidaci odpadu k likvidaci.

Vždy dodržujte platné zákony upravující likvidaci materiálu v zemi použití.



Symbol na  přístroji znamená, že musí být zlikvidován jako "tříděný odpad".

Uživatel proto musí přístroj odeslat (nebo dát pokyn jiným lidem, aby přístroj poslali) do jednoho z třídících středisek pro sběr odpadu zřízených místními radami, nebo ji zaslat prodejci proti nákupu rovnocenné přístroje (pouze v Evropské unii).

Tříděný sběr odpadu a následné zpracování, využití a odstraňování usnadňují výrobu zařízení využívajících recyklované materiály a omezují negativní účinky na životní prostředí a zdraví, které mohou být způsobeny nesprávným nakládáním s odpady.

Zneužívající dumping ze strany uživatele bude potrestán podle zákona.

Euronda[®]

EURONDA S.p.A.
Via dell'Artigianato, 7 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - ITALIE
Tel. (+39) 0444 656111 - Fax (+39) 0444 656199 - www.euronda.com - info@euronda.com