



Vynikající materiálová snášenlivost.  
Vhodné zejména pro dotykové  
obrazovky, displeje a mobilní  
telefony. Rychlá účinnost.

## Bacillool® 30 Tissues

Dezinfekční ubrousky s rychlým účinkem na citlivé  
povrchy v pohodlném a praktickém balení.



Výzkumem k prevenci infekcí. [www.bode-science-center.com](http://www.bode-science-center.com)



# Bacillo® 30 Tissues

## Vlastnosti přípravku

- ubrousky k okamžitému použití napuštěné přípravkem Bacillo® 30 Foam
- z vysoce kvalitního materiálu odolného proti roztržení s výbornou absorpční schopností
- rychlý účinek
- zvláště šetrný k materiálům; vhodný i pro citlivé materiály jako je Makrolon®, plexisklo a polysulfon
- dobře smáčí povrchy a rychle osychá
- snadné a bezpečné vyjmutí jednotlivých utěrek z uzavíratelného praktického balení
- bez aldehydů, barviv a parfemace



## Složení

Účinné látky roztoku:

Ethanol 140 mg/g; propan-2-ol 100 mg/g; propan-1-ol 60 mg/g, N-alkyl-amino-propyl-glycin (CAS 1397 34-65-9) 5 mg/g.

## Mikrobiologická účinnost

- baktericidní
- fungicidní na kvasinky
- virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)
- účinný na noroviry (MNV)
- účinný na polyomaviry a rotaviry

## Oblasti použití

Bacillo® 30 Tissues jsou vhodné na rychlou a pohodlnou dezinfekci všech povrchů z citlivých materiálů:

- displeje a klávesnice nebo dotykové obrazovky citlivých komunikačních zařízení, např. mobilních telefonů nebo počítačů
- citlivé povrchy ve zdravotnických zařízeních vyrobené např. z Makrolonu®, akrylového skla, polysulfonu a umělé kůže
- citlivé povrchy v závodních kuchyních, oblasti zpracování potravin a v jiných oblastech, kde dochází ke kontaktu s citlivými materiály

Zdravotnické vybavení a přístroje (zdravotnické prostředky), např.:

- displeje a klávesnice nebo dotykové obrazovky přenosných a stacionárních zdravotnických zařízení, např. monitorovací systémy
- citlivé neinvazivní zdravotnické prostředky, např. mamografické zařízení, lampy na operačních sálech

## Návod k použití

Důkladně otřete povrch ubrouskem Bacillo® 30 Tissues. Pro dosažení co nejlepšího výsledku dezinfekce se ujistěte, že je povrch zcela smočen. Díky svému složení mohou být Bacillo® 30 Tissues používány bez rukavic, není-li jejich použití nutné z jiných důvodů (protiinfekční opatření, ochrana zdraví při práci). Nepoužívejte k čištění pleti. Po použití vhodně zlikvidujte. Chcete-li zabránit vysušení ubrousků, uzavřete balení bezprostředně po použití. Nepoužívejte na dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

- dezinfekce pevných ploch:  
koncentrát                      expoziční čas 30 s

*Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*

## Doporučení pro dezinfekci postřikem/otřením

Bylo prokázáno, že významným zdrojem kontaminace a infekce jsou neživé povrchy (1). Aby se malá a těžko přístupná místa vyloučila jako zdroj kontaminace a infekce, je ideální doplnit dezinfekci otřením o dezinfekci postřikem (2, 3, 4) alkoholovým přípravkem pro rychlou dezinfekci ploch. Je ovšem nutné dezinfekční přípravky používat správně:

- Před dezinfekcí postřikem dávejte vždy přednost dezinfekci otřením, která zabraňuje vzniku aerosolů a zajišťuje nejlepší možné smočení dezinfikovaného povrchu
- Pokud je to možné, při dezinfekci postřikem povrch následně otřete, aby byla kompletně smočena celá plocha (kombinovaná dezinfekce postřikem/otřením)
- Omezte dezinfekci postřikem pouze na ty oblasti, kde nemůže být použita dezinfekce otřením
- Vdechování aerosolů během dezinfekce se může do značné míry omezit, pokud během postřiku přípravek aplikujete nejdříve do suché utěrky nebo přímo na povrch z krátké vzdálenosti

- Pokud je to možné, používejte přípravky na bázi alkoholu, které neobsahují žádné přísady, rychle osychají a nezanechávají žádná rezidua
- Další alternativou jsou dezinfekční pěny na bázi alkoholu, které během aplikace nevytvářejí aerosoly

1 Weber DJ et al. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health care-associated pathogens: Norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. American Journal of Infection Control, 2010, 38 (5): 25-33.

2 Verbund für Angewandte Hygiene e.V. Desinfektionsmittel-Kommission. Fragen und Antworten zu Maßnahmen der Antiseptik und der chemischen Desinfektion. www.vah-online.de, 2011.

3 Berufsgenossenschaftliche Regel: „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“ (BGR 206). www.bgw-online.de.

4 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 525 „Umgang mit Gefahrstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung“. www.baua.de.

Výzkumem k prevenci infekcí. [www.bode-science-center.com](http://www.bode-science-center.com)



# Bacillo® 30 Tissues

## Mikrobiologická účinnost

Bacillo® 30 Tissues jsou k okamžitému použití.

<b>Bakterie a fungi</b>		
EN Fáze 2 / Krok 1 Účinnost podle EN norem Fáze 2 / Krok 1 (suspenzní testy),	Baktericidní (EN 13727) - špinavé podmínky	30 s
	Fungicidní na kvasinky (EN 13624) - špinavé podmínky	30 s
DGHM Rychlá dezinfekce (podle Německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii [DGHM]); Založeno na suspenzních a praktických testech:	Baktericidní/Fungicidní na kvasinky - špinavé podmínky	30 s
<b>Viry</b>		
Účinnost proti virům (Německá asociace pro kontrolu virových onemocnění [DVV])	Virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)	30 s
Hodnocena účinnost na neobalené viry (podle DVV)	Polymaviry	5 min
Hodnocena účinnost na neobalené viry (podle EN)	MNV - čisté podmínky - špinavé podmínky Rotaviry	5 min 5 min 1 min
<b>(Potravinářský) průmysl</b>		
EN Fáze 2 / 2 Fáze 2 / 1 Účinnost podle norem EN (Fáze 2 / 2 a Fáze 2 / 1), testováno za rozdílných podmínek	Baktericidní (EN 13697 + EN 1276) - nízké, vysoké a mléčné znečištění (20°C) Fungicidní na kvasinky (EN 13697 + EN 1650) - nízké, vysoké a mléčné znečištění (20 °C)	1 min 1 min
EN Fáze 2 / Krok 2 Účinnost podle EN, Fáze 2 / Krok 2 (praktické testy), testováno za rozdílných podmínek	Baktericidní (EN 13697) - nízké, vysoké a mléčné znečištění (20°C) Fungicidní na kvasinky (EN 13697) - nízké, vysoké a mléčné znečištění (4°C, 10°C a 20°C)	1 min 1 min 1 min
EN Fáze 2 / Krok 1 Účinnost podle EN Fáze 2 / Krok 1 (suspenzní testy), testováno za rozdílných podmínek	Baktericidní (EN 1276) - nízké, vysoké a mléčné znečištění (20°C) Fungicidní na kvasinky (EN 1650) - nízké, vysoké a mléčné znečištění (20°C)	1 min 1 min 1 min

Všechny údaje odpovídají dezinfekčnímu roztoku přípravku Bacillo® 30 Foam

## Klasifikace

Všechny údaje odpovídají dezinfekčnímu roztoku přípravku Bacillo® 30 Foam:

- uvedeno na seznamu Asociace pro aplikovanou hygienu (VAH)
- označení CE podle zákona o zdravotnických prostředcích
- zalistováno v seznamu virucidních dezinfekčních přípravků vydaném Německou průmyslovou asociací pro hygienu a povrchovou ochranu (IHO)
- zalistováno v seznamu dezinfekčních přípravků (potravinový) vydaném Německou průmyslovou asociací pro hygienu a ochranu povrchů (IHO)

## Chemicko-fyzikální údaje

Všechny údaje odpovídají dezinfekčnímu roztoku přípravku Bacillo® 30 Foam:

- Bod vznícení (DIN EN ISO 3679) 31 °C
- Hustota (20 °C) cca 0,96 g/cm<sup>3</sup>
- Refrakce n<sub>D</sub><sup>20</sup> cca 1,36

Údaje týkající se flísové utěrky:

- Rozměry: 180 mm x 200 mm

## Exspirace

- po otevření: 3 měsíce



### Balení

981312 Flow-pack s 80 ubrousky

**Poznámka:** Doporučení našich přípravků jsou založeny na vědeckých testech a jsou uvedeny v dobré víře. Podrobnější doporučení, např. materiálová snášenlivost, jsou možné pouze v konkrétních případech. Naše doporučení jsou nezávazná a nepředstavují žádnou záruku. Nejsou vyloučena vlastní testování přípravku pro vlastní účely a výrobu. V tomto případě nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Toto je v souladu s našimi všeobecnými podmínkami nabídky a prodeje.

07/13

Naše hygienické a dezinfekční přípravky zajišťují nejlepší možnou kvalitu, což je potvrzeno komplexními důkazy o účinnosti a vědeckým výzkumem a vývojem.

Výzkumem k prevenci infekcí. [www.bode-science-center.com](http://www.bode-science-center.com)

