


# Urin-Monovette® - Návod k použití

1

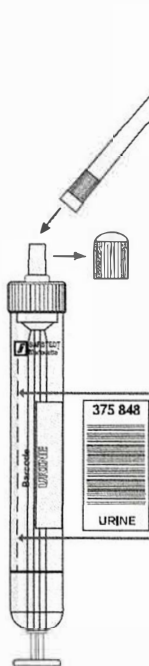

Nalepte etiketu podél linky.

Sejměte zátku a uchovejte ji pro zpětné uzavření!

Nasadíme sací špičku.

2




Sací špičku ponoříme do nádoby a vytáhneme píst Urin-Monovette® až k základní lince.

3



Držte Urin-Monovette® ve svislé poloze špičkou vzhůru a píst stáhněte dolů až nadoraz, aby jste vyprázdnili sací špičku.

4

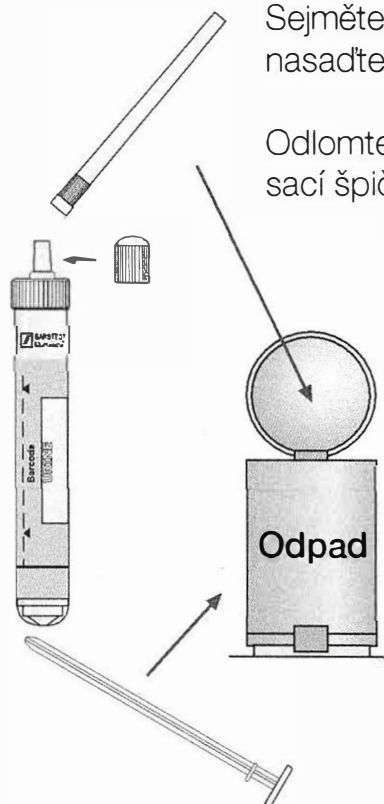

Sejměte sací špičku a nasadte zpátky zátku.

Odlomte píst. Píst a sací špičku zlikvidujte.

 **SARSTEDT**