

### Indikátor MDIS-250 – chemický indikátor pro kontrolu horkovzdušné sterilizace

Objednací číslo: 253 364 001 250

#### Návod k použití:

Umístěte indikátorový proužek do balení určeného ke sterilizaci horkým vzduchem (bližší informace viz národní legislativa). Barva indikátoru se po správné sterilizaci změní ze zelené na hnědou. Dbejte přitom na to, aby se barva indikátoru nedostala do přímého kontaktu se sterilizovaným materiálem.

#### Skladovací podmínky:

Skladujte při běžné pokojové teplotě s maximem od 15 do 30 st.C a relativní vlhkosti vzduchu 30-70%.

#### Expirace:

Datum je uvedeno na každém obalu

Indikátor MDIS-250 je zařazen jako typ 4 dle normy ISO11140-1

#### Balení:

250 ks, velikost 102 x 16 mm

V případě, že barevná změna nedosáhne optimální úrovně, proveďte test ještě jednou. Pokud se závada znovu opakuje, vyzkoušejte jiný typ testovacího systému, případně biologický a kontaktujte dodavatele.



Poslední revize návodu: 31. 7. 2019