


Návod STERIKING DCG2

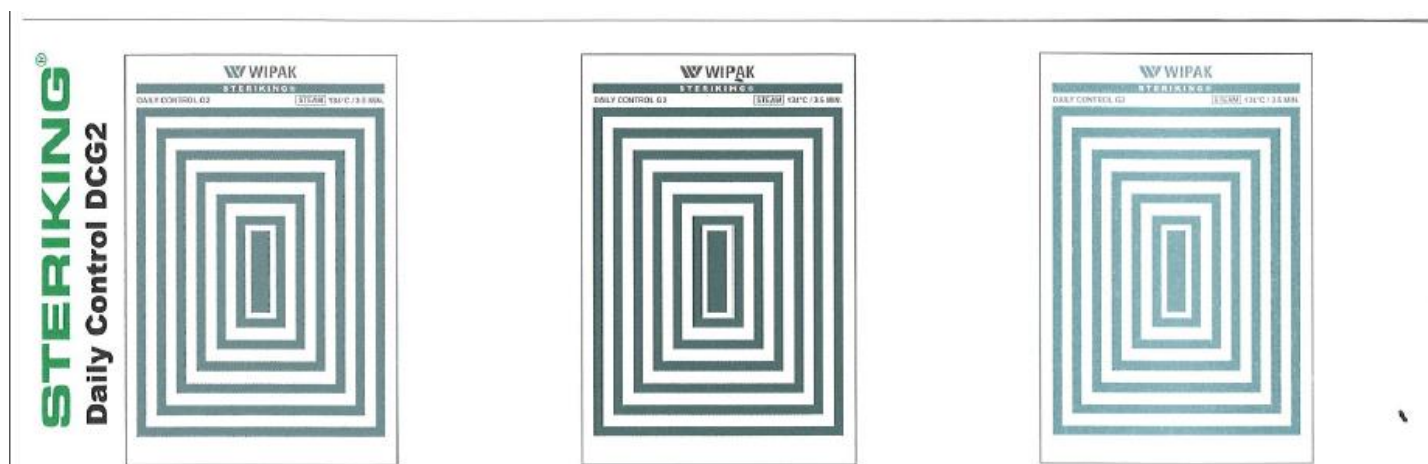

Zcela změněná barva

Minimální celistvý odstín,
Kterého musí být dosaženo

Zcela změněná barva

(3,5 min 134°C)
maximální celistvý odstín,
Kterého lze dosáhnout

nesprávně změněná barva

možné příčiny: čas sterilizace moc
krátký nebo teplota moc nízká

Návod k použití

Podle ISO 11140-1 (typ 2), ISO 11140-4

DCG2 je denní test typu Bowie-Dick pro vakuové autoklávy a měl by být používán jako standardní testovací balíček Bowie-Dick (EN 285).

Před provedením testu projedte cyklus 134°C naprázdno.

Hned po tomto cyklu vložte DCG2 do komory na místo, které je identifikované jako nejchladnější bod v komoře. Nechte projet test průniku páry (134°C max. 3,5 min.) s prázdnou komorou.

Po dokončení cyklu, vyjměte DCG2 balíček, otevřete ho a podívejte se na testovací arch.

Arch musí změnit barvu ze světle zelené do tmavé barvy. Pokud je změna barvy nejasná nebo nedostatečná, test opakujte. Pokud nevyjde ani druhý test zaznamenejte na archu výsledek "neprošel".

Zaznamenejte na archu výsledek s dalšími relevantními daty. Pokud test neprojde, sterilizátor nefunguje správně a potřebuje servis, nastavení a validaci.

Konečná změna barvy je permanentní, zaručuje spolehlivý záznam k založení.