

# ***zeta 4 wash***

**SURFACES**



**HIGH PERFORMANCE DETERGENT SOLUTION  
FOR WASHABLE SURFACES**

**CONCENTRATE 1%-3%**



Reorder N.  
**REF C810037**

U118068/A

**3000 ml e**



**Zhermack®**  
CLINICAL

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (Ro) - Italy  
Tel. +39 0425 597 611 - [www.zhermack.com](http://www.zhermack.com)

Made in Italy

## **CS**

### **Vlastnosti**

Koncentrovaný hygienizační, čistící a deodorační roztok. Osvěžuje je a ozdravuje prostředí; čistí rychle a důkladně. Nenapadá pryž, dřevo, plasty, porcelán, keramiku a smalty. Není agresivní vůči kovům.

### **Použití**

Vhodný pro:

- hygienizaci zubní ordinace a zubní laboratoře (umývadla, dlaždičky, podlahy, sociální zařízení, dveře);
- v nemocnicích a na klinikách pro umývání oddělení, chodeb, kuchyní, pokojů a prostorů.

### **Způsob použití**

Zředte 2-3 dávkovací zátky 5 litry vody. Na odolnější špínu použijte utěrku navlhčenou několika kapkami koncentrovaného přípravku. Přípravek stačí pro 30-50 litrů zředěného roztoku.

### **Upozornění a podmínky uchování.**

Po použití uzavřete pečlivě obal a uložte ho na místo nepřístupné dětem. Po použití nevyhazujte obal do okolního prostředí. Biodegradabilní výrobek nad 90% (čl. 2 a 4 zákona č. 136 ze dne 26/04/83)

### **Detergent pro tvrdé povrchy**

Složky odpovídají požadavkům nařízení ES 648/2004 <5% kationových tenzidů, neionových tenzidů, soli EDTA Parfém, Limonen Konzervační činidlo, BHT