

Návod k použití HOT & COLD SÁČEK

Horká terapie:

Použití:

Kdykoliv, kdy je potřeba použít horkou terapii.

Aplikace:

Horká voda: namočte sáček do vroucí vody po dobu maximálně 7 min. Následně vyjměte, vysušte, zabalte do hadříku a aplikujte. Pozor: sáček se nesmí během ohřevu dotýkat dolní části nádoby.
Mikrovlnná trouba: vložte sáček do mikrovlnné trouby po dobu maximálně 2 minuty, max. příkon 780/800W. Vyjměte jej, vysušte, zabalte do hadříku a aplikujte na potřebná místa.

Studená terapie:

Použití:

Kdykoliv, kdy je potřeba použít studenou terapii.

Aplikace:

Do mrazničky vložte sáček maximálně na 1,5 až 2 h. Následně jej vyjměte, vysušte, zabalte do hadříku a aplikujte kde je to nutné.

Upozornění

- Použita mohou být pouze nepoškozená balení.
- Nepoužívejte na poraněnou kůži!
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Nepoužívejte déle než 20-30 minut.
- Čistění: nečistoty odstraňte mýdlovou vodou pro ruční mytí a poté důkladně omyjte vodou z vodovodu, osušte ručníkem.
- Neotevírejte sáček.
- Držte mimo dosah dětí.

Pokyny k likvidaci

V případě poškození musí být rozlitý gel opláchnut vodou! Balení musí být likvidováno v souladu s příslušnými předpisy dané země.








Obsah balení

13,5x18 cm, 40 sáčků/ kartón

13,5 x28 cm, 20 sáčků/kartón

Expirace: do doby poškození nebo otevření obalu.

02.05.2022. V01

 Výrobce	 Upozornění	 Uživatelský manuál	 Zdravotnický prostředek
 Šarže	 Nepoužívejte, pokud je obal poškozený		

Ultragel Medical Kft.

✉ 1022 Budapest, Aranka utca 12.

☎ +36 1 278 3050

✉ info@ultragelmedical.hu

🌐 www.ultragelmedical.hu