

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

Endo-Prep CREAM PŘÍPRAVEK K ROZŠÍŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

SLOŽENÍ:

15% EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), 10% peroxid močoviny ve vodním roztoku polypropylenglykolu.

POUŽITÍ:

Přípravek Endo-Prep se aplikuje během chemického a mechanického čištění a tvarování kořenových kanálků. EDTA obsažená ve výrobku Endo-Prep pomáhá odstraňovat ionty vápníku z dekalifikovaných kanálků a vrstvu stěru, čímž usnadňuje čištění a tvarování kanálků.

Použije-li se společně s chlornanem sodným, účinkuje jako bělidlo a odstraňuje změnu barvy zubů z důvodů nekrózy.

Peroxid močoviny obsažený ve výrobku spolu s chlornanem sodným uvolňuje aktivní kyslík, který pomocí bublinového efektu čistí kořenový kanálek od úlomků po mechanickém ošetření a dopravuje je na povrch. Polypropylenglykol usnadňuje zavedení nástroje do kořenového kanálku a minimalizuje nebezpečí jeho poškození.

Endo-Prep CREAM pomáhá vybělit zuby zbarvené v důsledku nekrózy.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Izolujte ošetřovaný zub pomocí kofferdamu. Otevřete komoru zubu a vypláchněte ji chlornanem sodným. Komoru vyplňte přípravkem, nebo jej naneste přímo na nástroj určený pro kořenový kanálek. Mechanická práce na kanálku musí probíhat za současného pečlivého vyplachování kanálku roztokem chlornanu sodného (např. Chloraxem) do skončení bublinového efektu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Nedoporučujeme ponechávat přípravek v kanálku nebo komoře zubu mezi jednotlivými návštěvami zubaře, neboť to může vést k přílišnému změkčení dentinu.

UCHOVÁVÁNÍ:

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Uchovávejte v těsně uzavřeném obalu při pokojové teplotě 5–15 °C.

Datum expirace je uvedeno přímo na obale.

Po otevření obalu se datum expirace nemění, je-li obal po každém použití těsně uzavřen.

Pracovní
postup

Dentalni
material
.cz