

MIRAJECT

Dentální injekční jednorázová kanyla.

- Miraject kanyla je zajištěna papírovou pečetí a kontrolním číslem sterilizace.
- Použít jen, je-li papírová pečeť neporušena.
- Před použitím sejmout drážkovaný ochranný kryt.
- Jehlu společně se zůstavším šestihranným plastovým pouzdrům našroubovat na závit stříkačky.
- Barevný kónus z umělé hmoty je možné pevně našroubovat na všechny dostupné stříkačky.
- Šestihranné plastové pouzdro sejmout bezprostředně injekční aplikací !
- Každá jehla musí být po jednorázovém použití zničena, protože opakovaná sterilizace není možná.
- Jehly se nikdy nedotýkejte !

Obsah balení: 100 kanyl

HAGER-WERKEN GmbH & Co.KG

Ackerstrasse 1

47269 Duisburg

Německo