

Cold Spray

Netoxický sprej k výzkumu vitality a k ochlazení otiskovacích materiálů. Neobsahuje CFC. Speciální ventil umožňuje ekonomickou aplikací.

POZOR!

- Nádobu pod tlakem!
- Hořlavý výrobek!
- Chraňte před sluncem a teplotou vyšší než 50°C!
- Nepochichujte nádobu!
- Neaplikujte poblíž ohně nebo horkých předmětů!
- Chraňte před zapalovacími zdroji - nekuřte!
- Ukládejte na místě nedostupném pro děti!

Návod:

1. Před použitím dobře zatřeste nádobou.
2. Aplikujte sprej ze vzdálenosti 2-3cm po dobu 1 až 2 minut.
3. Pokračujte v realizaci testu vitality.