

Sada Evolution na zavádění tělísek

- Nůžky na střihání nití – délka 22 cm (ABS / nerezová ocel)
- Forceps dlouhý – délka 25 cm (polyamid)
- Forceps Pozzi – délka 25 cm (polyamid)
- Dvojitý hysteroometr – délka 30 cm (polyethylen)
 - Oba konce hysteroometru jsou flexibilní.
 - 2 flexibilní a tvarové paměti s postupnou dilatací.
 - Pro všechny typy vložení IUD a dělohy.
 - 1. strana: Průměr od CH 10 do CH 14 (od 3,3 mm do 4,7 mm)
 - 2. strana: Průměr od CH 8 do CH 12 (od 2,66 mm do 4 mm)
 - Pro zachování sterility jsou oba konce jsou chráněny polyethylenovým krytem.

REF CK-503

Číslo zboží.: 0.134./SAP:76005

V kartonu deset sad.

Sterilizováno ethylenoxidem

Návod k použití

Vložte gynekologické zrcadlo a použijte dlouhý forceps k dezinfekci cervixu. Uchopte cervix Pozzi forcepsem a narovnejte dělohu. Polohu cervixu srovnajte s osou vagíny. Dle zvoleného tělíska zvolte jednu ze stran hysteroometru a zaveďte jej přes cervikální kanál až na dno dělohy. Určete pozici a hloubku dělohy. Hysteroometr opatrně vytáhněte. Zaveďte nitroděložní tělísko dle instrukcí jeho výrobce. Dlouhými nůžkami ustříhnete nit.

Likvidace produktu

Po dokončení zákroku produkt a jeho obal zlikvidujte dle příslušných nařízení a postupů likvidace nebezpečného odpadu vašeho pracoviště.

Upozornění

Před prací s nitroděložním tělískem si přečtěte jeho návod k použití.









Tento produkt je zdravotnický prostředek a je určen pouze k profesionálnímu použití.

Produkt nepoužívejte, pokud je jeho obal viditelně poškozen následkem nesprávné manipulace, přepravy či nevhodného skladování.

Varování

Tento produkt je určen pouze k jednorázovému použití, v žádném případě jej nepoužívejte opakovaně. Opakované použití představuje velké riziko křížové kontaminace.

 0476

 Výrobce	 Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
 Varování	 Nesterilizovat
 Šarže	 Datum spotřeby
 Sterilizováno ethylenoxidem	 Nepoužívat znovu