

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

HYDROCAL

Hydroxid vápenatý

HYDROCAL Hydroxid vápenatý

SLOŽENÍ:

Čistý hydroxid vápenatý p. a.

BALENÍ:

Lahvička obsahující 10 g prášku pro vytvoření pasty

POUŽITÍ:

Výrobek je určen k použití během stomatologického ošetření jako materiál pro dočasné vyplnění kavit a kořenových kanálků, a také během přímého nebo nepřímého překrytí pulpy. Výrobek má remineralizační účinky na tvrdé zubní tkáně a dočasně chrání kavitu nebo kanálek do konečného vyplnění. HYDROCAL doporučujeme používat k přípravě past v kombinaci s vybranou kapalinou, zejména s fyziologickým solným roztokem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Míchejte hydroxid vápenatý s destilovanou vodou nebo fyziologickým solným roztokem, až vznikne pasta. Směsí vyplňte kavitu nebo kanálek. Výplň musí zůstat v kavitě nebo v kořenovém kanálku po dobu jednoho týdne až 30 dnů

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek může vyvolat riziko vážného poškození očí. V případě zasažení oči ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.



Výrobek dráždí pokožku a sliznice ústní dutiny. V případě zasažení pokožku nebo ústní dutinu ihned opláchněte/vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek dráždí dýchací cesty. V případě problémů s dýcháním vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s výrobkem je nutné používat kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

KONTRAINDIKACE:

Hydroxid vápenatý nesmí být použit u pacientů přecitlivělých na výrobek.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v těsně uzavřeném obalu v suché a větrané místnosti při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte kovové obaly. Uchovávejte mimo dosah dětí. Datum expirace je uvedeno na etiketě výrobku.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ