

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

MTA+

Materiál pro výplň a obnovu kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ:

hydroxid vápenatý a křemíku, železo, hliník, sodík, draslík, bizmut, oxidy hořčíku, fosforečnan vápenatý

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Produkt se používá během ošetření zubů jako materiál pro výplň a pro dodání minerálů zubním kanálkům. Po smíchání s vodou je připraven za 6-10 minut.

MTA+ se používá speciálně v následujících případech:

- demineralizační poškození kořenových kanálků
- reverzní výplň apexu kořenového kanálku
- přímé překrytí dřene
- odstranění dřene
- při ošetření zubů s neúplně vyvinutými kořeny

Výrobek má remineralizační účinky na tvrdé tkáně zubu, bezpečně utěsňuje kořenový kanálek.

MTA+ by se nemělo užívat jako samostatná nebo finální výplň kanálku.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Umístěte obsah lahvičky s MTA+ práškem na mísící podložku.

Přidejte 1-2 kapky MTA+ tekutiny pomocí pipety.

Míchejte po dobu 30 sekund, dokud není dosaženo konzistence mokrého písku. V případě, že konzistence směsi je příliš hustá nebo drobná, přidejte další kapku tekutiny (nebo destilované vody).

Vložte přípravek do vybraného místa za pomoci amalgamového podavače.

Použijte produkt pouze v případě, že akutní příznaky odezněly, jelikož kyselé pH reaguje s použitou MTA+. Dávka MTA+ je pouze na jedno použití. Po smíchání s MTA+ tekutinou (nebo destilovanou vodou) by se měl tento prášek použít do 10 minut. Po uplynutí této doby není již přípravek vhodný pro použití vzhledem k postupnému usazování a tvrdnutí směsi.

MTA+ tekutinu spotřebujte do 1 roku od otevření.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

UPOZORNĚNÍ

Produkt může způsobit poškození očí.

Dráždí sliznici dutiny ústní, pokožku a oči.

V případě kontaktu vypláchněte okamžitě dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

V případě požití vypijte dostatečné množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Během ošetření se doporučuje použít ruber-dam, jednorázové rukavice a ochranné brýle.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C.

Chraňte před vlhkem.

Udržujte mimo dosah dětí.

Datum expirace je uvedeno na obale.

ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU

Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně.

DOSTUPNÁ BALENÍ

-MTA+ MINI - 3x prášek MTA+ (0,14 g) + 1x tekutina MTA+ (1 ml)

-MTA+ STANDARD - 6x prášek MTA+ (0,14 g) + 1x tekutina MTA+ (1 ml)

-MTA+ MAXI - 10x prášek MTA+ (0,14 g) + 1x tekutina MTA+ (1ml)

-MTA+ PRO - 10x prášek MTA+ (0,14 g) + 1x tekutina MTA+ (1 ml) + MATRIX MTA+

Dentalni
material
.cz