

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

RED DETECTOR Indikátor zubního kazu

SLOŽENÍ:

Rhodamin B, polypropylenglykol, povrchově aktivní činidla

BALENÍ:

Injekční stříkačka 2 ml včetně sady štětcových aplikátorů

POUŽITÍ:

Červené barvivo obsažené ve výrobku proniká do kazivého dentinu a zbarvuje ho do červena. Díky přípravku RED DETECTOR je práce bezpečnější, protože umožňuje lokalizovat kazivý dentin a je šetrná ke zdravé tkáni.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před ošetřením zašroubujte štětcový aplikátor do stříkačky.

Po odstranění všech viditelných kazivých lézí naneste jednu kapku přípravku v místě kavity, počkejte 5-10 sekund a kavitu vypláchněte a vysušte.

Jasně červené body indikují kazivý dentin.

Po použití vytáhněte píst stříkačky, aby přípravek nevytekl, vyšroubujte aplikátor a stříkačku uzavřete bílou šroubovací zátkou.

Výrobek lze použít opakovaně, zatímco aplikátor lze použít jen jednou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s výrobkem používejte koferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

KONTRAINDIKACE:

Nepoužívejte u pacientů přecitlivělých na složky výrobku.

UCHOVÁVÁNÍ:

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Uchovávejte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ