



## MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja

### Viruton Pulver

#### Návod k použití:

Podle tabulky dávkování odměřte příslušné množství vody z vodovodu a poté nasypete příslušné množství prášku pomocí přiložené odměrky, roztok promíchejte, nádobu přikryjte a odstavte na 15 min pro aktivaci. Po uplynutí stanovené doby roztok opět promíchejte. Použití teplé vody urychlí rozpouštění prášku. Drobné usazeniny na dně zajistí stabilitu roztoku v čase. Čištění a dezinfekce nástrojů a endoskopů: nástroje pečlivě ponořte do roztoku tak, aby byly všechny části a kanálky zdravotnického nástroje vyplněny roztokem. Po stanovené době působení (10 nebo 30 min v závislosti na vybraném ředění) nástroje z roztoku vyjměte a opláchněte vodou v kvalitě pitné vody (nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo demineralizovanou vodou). Každý den připravujte nový roztok. Přípravek není určen pro nástroje z hliníku, mědi či mosazi. Lze jej používat na nepoškozené pochromované a poniklované nástroje. Čištění a dezinfekce povrchů: povrch zdravotnického zařízení opláchněte roztokem nebo přetřete hadříkem a nechte 10 min působit. Čištění a dezinfekce inkubátorů: je k dispozici podrobný návod k dezinfekci inkubátorů. Chraňte před vlhkem. Po použití nádobu důkladně uzavřete. Nevkládejte mokré nástroje do prášku. Nepoužívejte pro jednorázové nástroje. Dodržujte doporučení výrobce nástrojů a zařízení. Pokud je obal poškozen, přípravek nepoužívejte. Skladujte při teplotě nižší než 25°.

Tabulka dávkování:

nástroj	ředění	množství vody	množství prášku	ředění	množství vody	množství prášku
1 l	1%	990 ml	10 g	2 %	980 ml	20 g
2 l	1%	1980 ml	20 g	2 %	1960 ml	40 g
3 l	1%	2970 ml	30 g	2 %	2940 ml	60 g

Medi-Sept Sp. z o. o.  
Konopnica 159 C  
21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22  
fax: +48 81 535 22 37  
zamówienia fax: +48 801 356 455

infolinia: +48 801 535 220  
info@medi-sept.com.pl  
www.medisept.pl