



Konopnica, 31.07.2018

MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja

Viruton Bohr

Návod k použití:

Návod k použití: Nástroje neprodleně po použití ponořte do neředěného přípravku. Pečlivě ponořte všechny části. Po určené době působení vyjměte nástroje z vaničky nebo myčky, opláchněte ve vodě a vysušte. Pokud se objeví viditelné nečistoty, odstraňte je kartáčkem a dezinfikovaný nástroj opět ponořte do přípravku. Po vysušení proveďte sterilizaci čistých nástrojů. Nekombinujte s jinými čisticími prostředky nebo dezinfekcemi. Výrobek je určen k profesionálnímu použití.

Medi-Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22
fax: +48 81 535 22 37
zamówienia fax: +48 801 356 455

infolinia: +48 801 535 220
info@medi-sept.com.pl
www.medisept.pl

Numer KRS: 0000020407, NIP 946-00-10-016, Wysokość Kapitału Zakładowego: 622 000,00 PLN, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdniku