

NOVINKA

Rychle a spolehlivě – každý den

Komplexně účinné utěrky
Mikrobac® Virucidal Tissues
k dezinfekci ultrazvukových sond
a dalších povrchů

HARTMANN




Mikrobac[®] Virucidal Tissues

Při čištění a dezinfekci semikritických zdravotnických prostředků, jako jsou ultrazvukové sondy, narazí mnoho dezinfekčních přípravků na své limity. To však není případ nových utěrek k okamžitému použití **Mikrobac[®] Virucidal Tissues**.

Praktické jednorázové utěrky, vyvinuté speciálně k dezinfekci invazivních ultrazvukových sond, kombinují nejvyšší uživatelský komfort a maximální bezpečnost pro pacienty.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně.
Před použitím vždy čtěte etiketu a návod k použití.

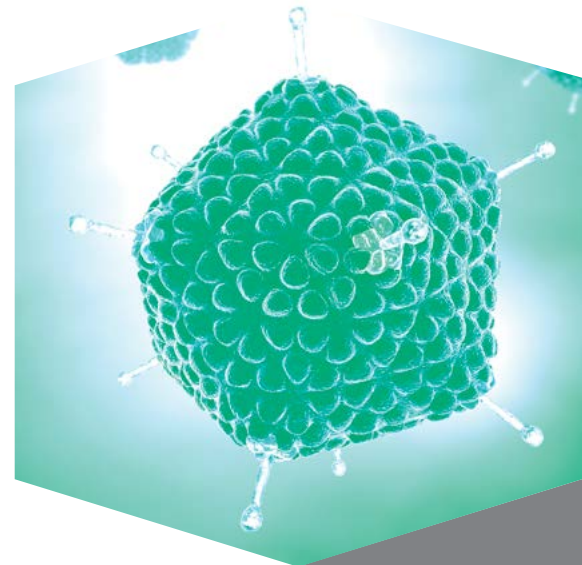


Mikrobac® Virucidal Tissues



Mikrobac® Virucidal Tissues mají plně virucidní účinnost a splňují požadavky všech legislativních směrnic týkajících se čištění a dezinfekce semikritických zdravotnických prostředků. Dezinfekční utěrky spolehlivě a rychle působí na nebalené viry, např. lidský papillomavirus.

Při výskytu infekcí vyvolaných např. noroviry nebo *Clostridium difficile* představují utěrky **Mikrobac® Virucidal Tissues** vhodný způsob provádění dezinfekce na izolačních pokojích, stejně tak jako povrchů v blízkosti pacienta.



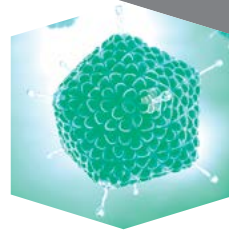

Po vyšetření znamená zároveň před vyšetřením.
Mikrobac® Virucidal Tissues usnadňují práci a minimalizují čas mezi dvěma vyšetřeními, protože zajišťují:

Okamžité
další použití
dezinfikovaných
předmětů a povrchů





Krátké expoziční doby

Praktické jednorázové utěrky, které své jméno získaly díky kompletní virucidní účinnosti za 30 s, jsou testovány podle evropských norem a požadovaných metod německé Asociace pro aplikovanou hygienu (VAH) a německé Společnosti pro potírání virových onemocnění (DVV) při Institutu Roberta Kocha (RKI).

Spektrum účinnosti:

Virucidní (EN 14476)	30 s
Sporicidní (EN 13704)	10 min
Baktericidní / fungicidní na kvasinky (EN 13727, EN 13624, EN 16615)	2 min
Fungicidní (EN 13624, VAH)	5 min


Plně
virucidní účinnost
za 30 sekund
podle EN 14476

Méně je více

Pro svoji komplexní účinnost potřebují **Mikrobac® Virucidal Tissues** pouze malé množství účinné látky - méně než 0,5 % KAS.

- ▶ Menší množství účinné látky znamená méně nepříjemných chemických výparů.
- ▶ Další plus: přípravek nezanechává na povrchu téměř žádná rezidua.

Menší množství účinné látky –
méně výparů
a reziduí





Mikrobac® Virucidal Tissues dezinfikují v širokém spektru účinnosti, a současně jsou velmi šetrné k povrchům z citlivých materiálů.

- ▶ Výhoda: mezi personálem roste jejich obliba a s ní také ochota dezinfikovat zdravotnické prostředky nebo povrchy po každém jejich použití.

Menší množství účinné látky –
výborná snášenlivost
citlivými povrchy
při
plné účinnosti



Úspora času



4 týdenní
doba použitelnosti*

Utěrky k okamžitému použití jsou dodávány v praktickém balení, takže jsou vždy po ruce a šetří čas, který je obvykle potřebný pro přípravu dezinfekce. Pokud se utěrky používají každý den, je jejich doba použitelnosti čtyři týdny*.

Velikost utěrky 180 mm x 200 mm umožňuje snadnou dezinfekci semikritických zdravotnických prostředků a malých povrchů.

Utěrky vynikají nejvyšší kvalitou a poskytují výjimečnou účinnost.

* Balení, které se nepoužívá sedm dní nebo déle, se musí vyhodit.



Návod k použití

Plochy určené k dezinfekci důkladně otřete utěrkou **Mikrobac® Virucidal Tissues**.

K provedení dokonalé dezinfekce je nutné celou plochu kompletně namočit.

Po uplynutí expoziční doby opláchněte zdravotnické prostředky a ultrazvukové sondy (v případě, že přicházejí do přímého kontaktu s kůží nebo sliznicí) vodou kvality nejméně pitné vody a osušte je.

Z citlivých plastových povrchů zdravotnických prostředků setřete po uplynutí expoziční doby všechna rezidua dezinfekčního přípravku utěrkou navlhčenou vodou nejméně kvality pitné vody.



Mikrobac[®] Virucidal Tissues v kostce



Dezinfekční utěrky k okamžitému použití s účinností virucidní a proti sporám *Clostridium difficile*, k dezinfekci ultrazvukových sond, vč. vaginálních a jícnových.

- ▶ virucidní účinnost podle EN 14476 za 30 sekund
- ▶ široké spektrum účinnosti včetně baktericidní*, fungicidní na kvasinky*, fungicidní** a sporicidní***
- ▶ šetrné k povrchům (< 0,5 % KAS)
- ▶ téměř nezanechávají rezidua
- ▶ velikost utěrky 180 mm x 200 mm / 80 ks v balení
- ▶ doba stability 4 týdny****

* EN 13727, EN 13624, EN 16615 – 2 min

** EN 13624, VAH – 5 min

*** EN 13704 – 10 min

**** Balení, které se nepoužívá 7 dní a více, se musí vyhodit.



Mikrobac® Virucidal Tissues

jsou Vaším osvědčeným partákem
pro každodenní práci všude tam, kde je
vyžadováno široké spektrum účinnosti.

Ochrana personálu a pacientů je prvořadým cílem našeho vědeckého přístupu, který je založen na komplexním testování účinnosti, zkoumání infekčních rizik a rozvoji kvality našich produktů a účinných preventivních metod.

Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com



Výrobce:
BODE Chemie GmbH
Společnost
HARTMANN GROUP

Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg
Německo
bode-chemie.com

Distributor:
HARTMANN-RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška

Telefon: 800 100 333
kontakt@hartmann.cz

www.hartmann.cz



O krok dál
pro zdraví