

Sekudrill

Kapalný přípravek k dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentaria z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických leštících nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů.

Sekudrill je deklarován jako zdravotnický prostředek, třída IIb



Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a virům (včetně HBV a HIV) a úspěšně testován společností MEDIN
- roztok je určen k okamžitému použití, neředí se
- vhodný do ultrazvukových čističek
- vynikající čistící schopnost
- krátká expozice
- nekorozivní
- bez zápachu

Složení: antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy inhibitory koroze.

Obsah účinných látek ve 100 g Sekudrillu

50 g propylenglykolu
5 g hydroxidu draselného

Doporučené použití	expozice
bez použití ultrazvuku	15 min
v ultrazvukové lázni	10 min

Návod k použití: nástroje okamžitě po použití ponořte do neředěného roztoku tak, aby byly dokonale smočeny

- výhodné je použití Steriboxu, viditelné nečistoty v případě potřeby odstraňte kartáčkem
- po expozici 15 min bez použití ultrazvuku nebo 10 min v ultrazvukové lázni nástroje z roztoku vyjměte,
- omyjte tekoucí vodou a osušte utěrkou
- přípravek používejte denně čerstvý (malé množství odpovídající velikosti čištěného instrumentaria),
- použitý roztok před vylitím zředte (minimálně 1:10)
- ocelové nástroje před parní sterilizací ošetřete antikoročním přípravkem, nesterilizujte v malých autoklávech
- při použití na elastické leštící nástroje nikdy nepřekračujte nutnou expozici
- nepoužívejte na hliníkové předměty! (pro ně doporučujeme Sekusept forte)
- doporučení pro použití Sekudrillu vyplývají z dlouhodobých zkušeností výzkumných praktických pracovišť,
- přesto doporučujeme zákazníkům vhodnost použití Sekudrillu nejdříve odzkoušet (zejména s ohledem na odolnost materiálů čištěných nástrojů a případné barevné značení)
- uchovávejte v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C. Nevylévejte větší množství koncentráту do kanalizace. Při rozlití nejdříve mechanicky odstraňte pomocí svého materiálu (buničina, písek) a opláchněte větším množstvím vody,
- obaly je po vypláchnutí možno likvidovat

Bezpečnost: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (Nebezpečí; Žíravost pro kůži , Kategorie 1A; H314) nebo směrnice 1999/45/ES (C; ŽÍRAVÝ; R35)
Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Při práci s koncentrovaným přípravkem dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení, které naleznete v příslušném bezpečnostním listu přípravku.

- Pozor! Žíravina! Sekudrill je silně alkalický roztok, leptá sliznice, oční spojivky i pokožku. Může poškodit zdraví i při požití.
- při práci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a sliznic pokožky, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a ochranné rukavice. Vhodné je použití Steriboxu. Po práci si dobře omyjte pokožku a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)
- uchovávejte mimo dosah dětí
- Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

První pomoc:

- při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachujte alespoň 15 min pokud možno vlažnou tekoucí vodou
- při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody
- při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, vypijte větší množství vody
- při zasažení očí nebo při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Balení:

2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks